

# TR104 シレッセ スプレー式皮膚被膜剤

## 取扱説明書

### 1. 安全上の注意

#### [ 警告 ]

誤って服等に付着した場合は自然な状態でじゅうぶん乾燥させてください。少量でも残っていると引火するおそれがあります。

#### [ 禁忌・禁止 ]

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 本品に過敏症のある方又は過敏症の疑われる方は使用しないでください。使用に先立ち、皮膚の一部でパッチテストを行うことをお奨めします。
- 3) 本品は引火性の蒸気を発生し、燃焼を強めるおそれのある引火性の液体です。近くで喫煙したり、ストーブ等火気の近くで使用しないでください。
- 4) 本品の蒸気又は噴霧を直接吸入しないでください。偶発的に吸入した場合は、新鮮な空気のもとで深呼吸してください。不快感が認められる場合は、医師の診察を受けてください。
- 5) 皮膚の粘膜等（目、口、耳、鼻、膣の各部）の繊細で敏感な部位には、使用しないでください。
- 6) 皮膚に炎症等が発生した場合は、直ちに使用をやめてください。

#### [ 注意 ]

- 1) 換気の良い場所でご使用ください。
- 2) 本品が偶発的に目に入った場合は、直ちに大量の水で洗眼してください。不快感が認められる場合は、医師の診察を受けてください。
- 3) 本品を誤って口に入れた場合は、少量（200 ml）の水又は牛乳で口をゆすいでください。不快感が認められる場合は、医師の診察を受けてください。

### 2. 製品概要

本品を皮膚表面に噴霧して、皮膚からの老廃物や酵素、粘着剤等によるダメージから皮膚を保護します。



注文コード	品番	商品名
730-003-24	TR104	シレッセ,スプレー式皮膚被膜剤(バリア)

組成：シロキサン共重合体

### 3. 使用方法と注意事項

- 1) 本品を適用する皮膚表面を清拭し、よく乾燥させてください。
- 2) 使用前に本容器をよく振り、適用する部位から約 10cm 離して、ムラを生じないように噴霧してください。
- 3) 粘着剤（粘着性ドレッシング等）を併用してご使用になる場合は、保護被膜が完全に乾いていることを確認してください。



#### 注意

粘着剤を交換するごとに、本品を噴霧してください。

粘着剤と併用しない場合は、皮膚表面の状況に応じて 12～72 時間ごとに本品を噴霧することを推奨します。

通常、本品を除去する必要はありませんが、ニルタック粘着剥離剤と併用することで簡単に除去できます。


### 4. 保管方法

- 1) ペット及び子供の手の届かない、清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください
- 2) 使用期限：製造年月より 4 年間有効です [自己認証（当社データによる）]
- 3) 本品を廃棄する際は、完全に使い切ったことを確認し、処理する自治体等の規制に従って廃棄してください。

### 5. 販売元

村中医療器株式会社

〒540-8686 大阪市中央区東高麗橋 4 番 1 5 号

 0120-28-1228 受付：(月)～(金) 9:00～17:30