

2023年4月17日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社

MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

大阪市中央区船越町二丁目3番6号

Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

**フロートロンACS900 ソフトウェアバージョン4.079
リリースのご連絡**

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧いただいております「フロートロンACS900」につきまして、ソフトウェアバージョン4.079をリリースすることとなりましたので、下記にご案内申し上げます。今後とも、弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容

- ・「使用状況モニタリング機能」を追加（別紙参照）
- ・基板（P/N：526318）への変更。（ソフトウェアバージョン4.079が搭載されます。）

■変更開始時期

- ・旧バージョンの在庫がなくなり次第、順次切り替え致します。
- ・新たな基板（P/N：526318）を搭載した製品は、シリアルナンバー：2200020447以降が該当となります。

以上

【別紙】


●使用状況モニタリング機能

運転中にポンプからカフが外れたり、患者の脚部からカフが外れたことを検出した際に、警告の表示やアラーム音で通知する機能。


-上記機能設定

3段階の設定が可能

警告表示あり/アラーム音なし【出荷時の設定】

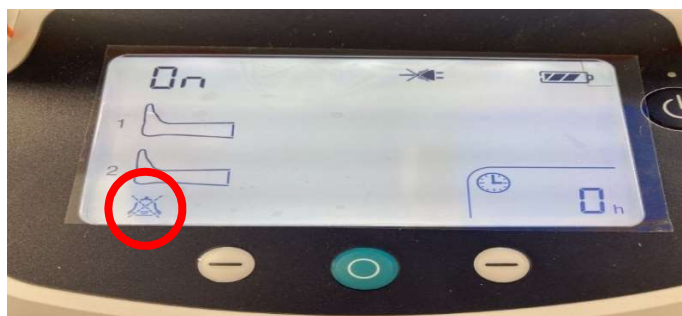

警告表示あり/アラーム音もあり

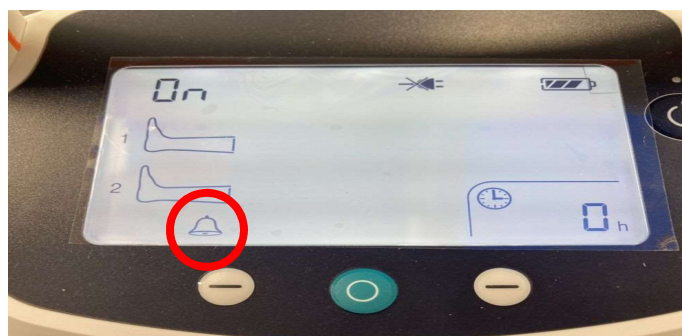

警告表示なし/アラーム音なし【従来と同仕様】

