



パラメータ監視システム装備

シーリングの重要なパラメータである**温度・圧力・速度**の3要素があらかじめ設定した規定値に適合していることを自動監視し、監視情報は次の4つの方法で確認できます。万一の異常発生時にはディスプレイとエラー音を通じてお知らせします。

1 ディスプレイ



ディスプレイの専用画面を通じてリアルタイムでパラメータを確認できます。

3 USBポート



F110DEPに装備されたUSBポートにUSBメモリを取付けることで、監視情報をテキストファイル形式で記録・保存できます。

2 印字情報



滅菌バッグに直接印字できるので装置のコンディションを簡単に記録できます。

4 専用ソフトウェア



RS-232CポートとPCを付属のケーブルで接続することで専用ソフトウェアを使って監視情報をリアルタイムで見ることができます。

※付属のCD-ROMよりインストールして下さい。
※対応OS ... Windows 2000/XP/Vista/7/8




ユーザーフレンドリー

日本語に対応したディスプレイの採用により滅菌日、有効期限、ロット情報などをどなたでも簡単に設定できます。



省電力設計

蓄熱性に優れたヒータエレメントの採用により、停止中の放熱を最小化し、再加熱時に要する電力量を削減しました。

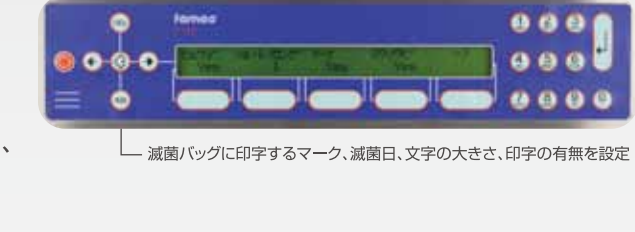

仕 様			
サ イ ズ	(本体)W527×D314×H162mm (ローラーテーブル)W710×D422×H70mm	印刷機能	(表示文字)絵文字／アラビア数字 (印刷項目)シール時の温度・圧力・速度 滅菌日(包装日)、有効期間(滅菌有効期間)、コード番号(ロット番号など) (日付表示設定)DMY=日・月・年、YMD=年・月・日、MDY=月・日・年(選択)
セットサイズ	W710×D634×H162mm		
材 質	ステンレス		
重 量	(本体)15kg (ローラーテーブル)5.8kg		
電 源	AC100V 50-60Hz		
消 費 電 力	(最大)365W/(平均)70W	そ の 他	デジタルメニューコントロール マイクログロッセッサコントロール オーバーヒート防止装置付
温度設定範囲	50～199℃		
シ ー ル 幅	12mm		
シール送り速度	10m／分		
			適 応



ロータリーヒートシーラー

ソフトウェアのバージョンアップにより、滅菌バッグへの印字操作がより簡単になりました!!

ロータリーヒートシーラー本体



ローラーテーブル

ISO
11607-2
適 合

ロータリーヒートシーラー本体
注文コード 717-003-04

標準価格
~~¥980,000~~ → **期間限定標準価格
¥880,000**

ローラーテーブル
注文コード 717-003-02

標準価格
~~¥150,000~~ → **期間限定標準価格
¥100,000**

キャンペーン対象外

[別売品]

USBシリアル変換アダプター ロータリーヒートシーラーF110DEP用

注文コード	品 番	標準価格
717-003-03	USB-RSAQ6	¥5,530

※USBシリアル変換アダプターをご使用の際はアダプターに付属されている
取扱説明書に記載のホームページよりアプリケーションをダウンロードして下さい。

[補充品]

インクリボン ロータリーヒートシーラーF110DEP用

注文コード	品 番	標準価格
717-001-03	SZ-11360	¥1,900

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363



ラベルガンシステム スターターセット

キャンペーン内容：

本体+ラベル1箱

期間限定標準価格
にてご提供いたします！



2017年

10月1日 >>> 12月28日

W キャンペーン

ロータリーヒートシーラー

キャンペーン内容：

**ロータリーヒートシーラー本体
ローラーテーブル**

期間限定標準価格
にてご提供いたします！



ISO
11607-2
適 合

滅菌物のリコール対策は万全ですか？

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015「14.滅菌物のリコール(回収)」では、滅菌物の滅菌不良が疑われる場合の対策として、滅菌包装の外面などに滅菌年月日・滅菌方法・滅菌ロット番号・使用滅菌器・作業者などを識別表示することを推奨しています。


famos

ラベルガン Premium

Label Gun Premium

2重シール構造により、患者の使用履歴管理にも対応します!!

- ▶ 患者への使用履歴管理(トレーサビリティー)のため、2重シール構造を採用していますので使用後の記録・保管も簡単です。
- ▶ 9種類のラベルを使い分けることで対象物の回収をより容易に！

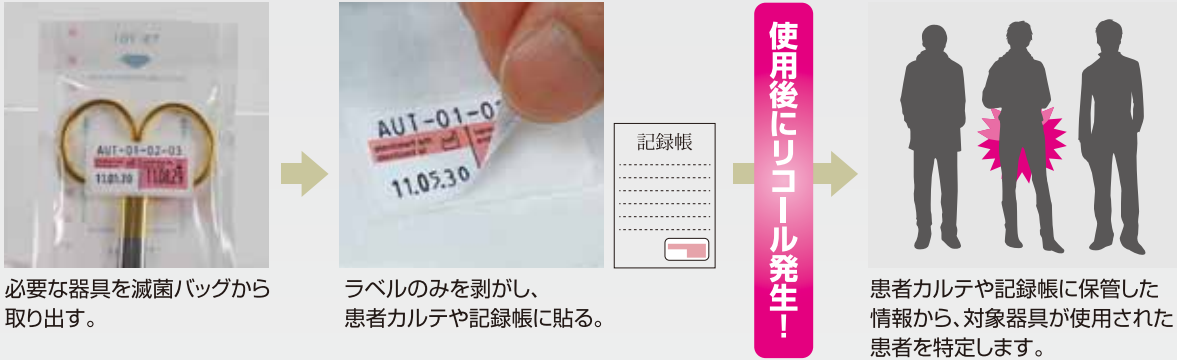

注文コード	品番	セット内容	ラベル	標準価格	特別価格
717-002-51	15.300.282PB	本体 + カラーラベル(ブルー)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-52	15.300.283PR	本体 + カラーラベル(レッド)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-53	15.300.284PG	本体 + カラーラベル(グリーン)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-54	15.300.285PY	本体 + カラーラベル(イエロー)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-55	15.300.286PO	本体 + カラーラベル(オレンジ)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-56	15.300.287PGY	本体 + カラーラベル(ライトグレー)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-57	15.300.288PW	本体 + カラーラベル(白色無地)		¥104,000	▶ ¥48,000
717-002-58	15.300.289PAC	本体 + インジケータ付ラベル(AC用)		¥107,000	▶ ¥48,000
717-002-59	15.300.171PEO	本体 + インジケータ付ラベル(EO用)		¥107,000	▶ ¥48,000

●本体サイズ：約W60×L270×H120mm ●本体重量：約440g ●ラベル入数：1箱(750枚×12巻入) ●インクロール1個付




メディカルハンドラベラー

Medical Hand Labeler

軽量でコストパフォーマンスに優れたシングルシステム!!

- ▶ 軽量で使いやすくコンパクトなデザイン。
- ▶ コストパフォーマンスに優れたシングル(1重)ラベル。
- ▶ 6種類のカラーラベルで用途別に対応。

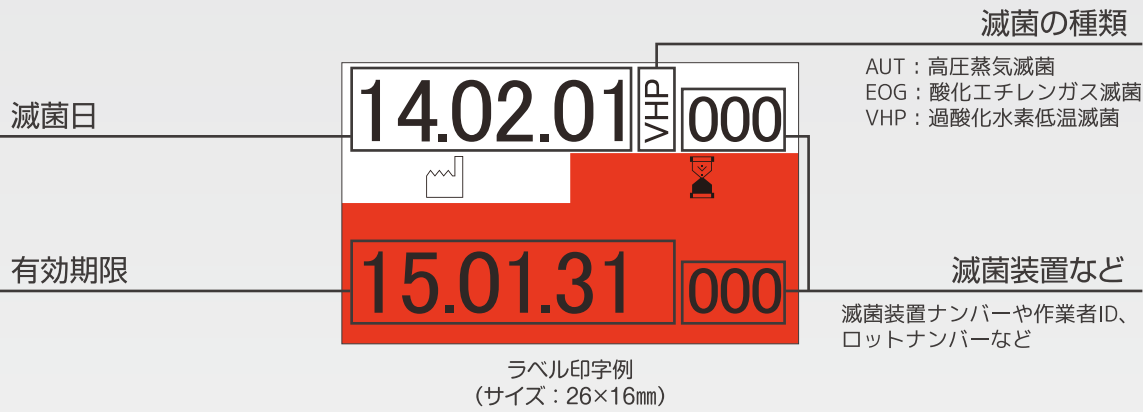

注文コード	品番	セット内容	ラベル	標準価格	特別価格
L92-001-31	B12/2616R/R/K.V20	本体 + カラーラベル(レッド)		¥31,800	▶ ¥15,000
L92-001-32	B12/2616R/B/K.V20	本体 + カラーラベル(ブルー)		¥31,800	▶ ¥15,000
L92-001-33	B12/2616R/Y/K.V20	本体 + カラーラベル(イエロー)		¥31,800	▶ ¥15,000
L92-001-34	B12/2616R/GN/K.V20	本体 + カラーラベル(グリーン)		¥31,800	▶ ¥15,000
L92-001-35	B12/2616R/O/K.V20	本体 + カラーラベル(オレンジ)		¥31,800	▶ ¥15,000
L92-001-36	B12/2616R/GY/K.V20	本体 + カラーラベル(グレー)		¥31,800	▶ ¥15,000

●本体サイズ：約W60×L250×H125mm ●本体重量：約360g ●ラベル入数：1パック(1000枚×12巻入) ●インクロール1個付