

Miele
PROFESSIONAL

ジェットウォッシャー

PG8592

ISO 15883-1/2 適合 ウォッシャー・ディスインフェクター

標準価格改定のご案内

平成28年5月の発売開始より、多くの医療施設でご採用いただいたドイツ ミーレ社製ウォッシャー・ディスインフェクターPG8592の本体標準価格を、昨今の為替状況を反映し、平成29年10月より下記の通り改定いたします。

国内での販売開始より30年以上、国内総納入台数600台以上*の“信頼ブランド ミーレ社製ウォッシャー・ディスインフェクター”をさらにお求めやすい価格でご提供いたします。

(※旧機種、別型機種含みます)

平成29年9月30日までのご注文

現行標準価格

¥2,980,000

平成29年10月1日以降のご注文

新標準価格

¥2,500,000

適用機種

066-001-19 ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 50Hz
066-001-20 ミーレ ジェットウォッシャーPG8592 60Hz

新価格によりさらにお求めやすくなった一方、
以下に記載するPG8592の様々な特長は変わらずご利用いただけます。

PG8592の特長①

使用済み手術器械を全自動で 処理します

洗浄作業者は、手術や診察により患者の血液や体液で汚染した手術器械をPG8592に収納してスタートさせるだけで、操作は完了です*。

洗浄・熱水消毒・乾燥をPG8592が全自動で処理しますので、安全性・作業効率の向上を実現します。

※汚染の状態によっては、前洗浄が必要な場合があります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

PG8592の一般的な運転プログラム

予備洗浄

メイン洗浄

すすぎ①

すすぎ②

最終すすぎ
(熱水消毒)

温風乾燥

※使用する洗剤の種類や水質によって運転条件が異なる場合があります。

※一般的な運転時間は90～100分です。



PG8592の特長②

ランニングコストを低く抑えます

PG8592の多彩な機能が消費エネルギー量を抑え、運転時のランニングコストは約162.2~202.9円と、環境性能にも優れています。

対象洗浄物	ランニングコスト/運転
手術器具	162.2~193.5円
麻酔器具	202.9円
鏡視下手術器具	171.9円
眼科手術器具	175.2円

算出条件
水道料金：0.07円/ℓ
電気料金：23円/kWh
使用洗剤：当社推奨品

PG8592の特長④

省スペース設計

600×600mmの外形寸法により、給排水・電気設備があればあらゆる場所に設置いただけます*。
写真のように収納棚や流し台にビルトイン設置することもできます。

PG8592の本体寸法
間口600mm、奥行600mm、高さ835mm（架台装着時：1235mm）
※装置の運転に必要な設備は、弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。



PG8592の特長⑥

特殊な器械への対応

1.眼科手術器械

微細な内腔器具にも対応可能な、各種コネクタを装備しています。
特に、内径1mmに満たない細腔針は、ルアーロック構造により確実に固定して処理できる他、細腔部に異物（骨片や金属片など）が詰まらないよう、洗浄水の灌流経路内に直径63μmのマイクロフィルター（オプション）を装着できます。



眼科ラック本体



細腔針装着例



マイクロフィルター



ハンドピース用ラック本体

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

PG8592の特長③

バスケットを最大8枚まで処理

一般的なウォッシャーデイスインフェクター用のバスケットを一回の運転で最大8枚まで処理します。

バスケットサイズ
幅485×奥行253×高さ50mm




PG8592の特長⑤

軟水装置内蔵

水道水に含まれ、洗浄効果を減退させるカルシウムやマグネシウムなどの陽イオンを、内蔵する軟水装置が除去します。PG8592の庫内には常に軟水が供給されるため、安定した洗浄効果を実現します。

※軟水器は定期的な再生処理が必要です。再生には専用の活性塩（注文コード：066-011-04）をご利用下さい。
再生処理の頻度は原水により異なります。

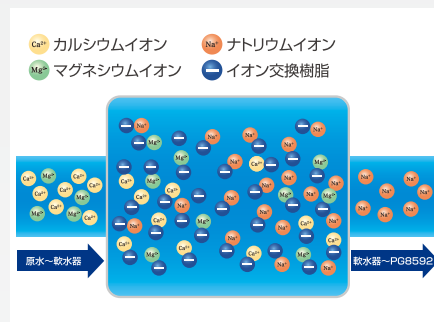

Muranaka 村中医療器 株式会社
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.
<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363