

エアゾールヘッドのすすぎ


エアゾールヘッドを薬液槽の中に入れます。
完全な作動を保証するために、VELOXcareを使用して、エアゾールヘッドを週に一度すすいでください。

i VELOXcareを使用した薬液槽のすすぎによって、エアゾールヘッドのメッシュ部分を機械的にフラッシングすることができます。
これにより見えないメッシュ部分の詰まりを除去します。(このすすぎによって、薬液槽の洗浄および消毒を行うわけではありません)


- VELOXcareの側のタブのロックを解除します。
- VELOXcareを開きます。




- リザーバの開口部を下方に向けて、薬液槽をVELOXcareの底部に入れます。青色のパルプベーンは最上部になければなりません。

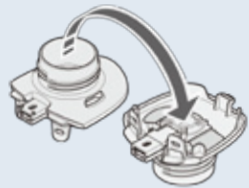

- VELOXcareを閉じ、タブをロックします。

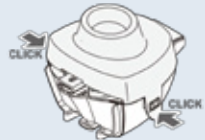

- VELOXcareをコントローラーに接続します。

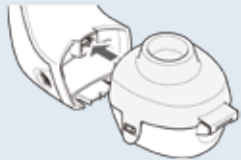

- 本装置下側のタブをロックします。



- VELOXcareに等張食塩水または蒸留水を2.5 ml充填します。



電源アダプターを使用した作動：

- 電源アダプターのUSBプラグをコントローラーのUSBポートに差し込みます。
- 電源アダプターを適切な電源コンセントに接続します。
- ▶これでVELOXcareの作動準備は完了です。



- コントローラーのON/OFFボタンを押して、すすぎを開始します。
- ▶本装置から音響信号が短時間発せられます。
- ▶ボタンのLEDが緑色に点灯します。
- ▶洗浄機能が実行されます。
- 鼻洗浄がすべて完了次第、ON/OFFボタンを押して、本装置のスイッチをオフにします。
- ▶本装置から音響信号が短時間発せられます。
- ▶ボタンのLEDが消灯します。
- 本装置下側のタブをロック解除します。
- VELOXcareをコントローラーから外します。



- VELOXcareのタブをロック解除し、VELOXcareを開きます。
- 薬液槽を取り出します。
- VELOXcareおよび薬液槽を水道水ですすぎます。



■PARI 製品のお問い合わせ

0120-799-221

受 付：9：00～17：30（土・日・祝日を除く）

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363



スマートフォン・タブレット端末から
商品の説明動画をご覧いただけます。

P1711.4500

Muranaka

PARI社 メッシュ式ネブライザー

VELOX® **特別価格!!**
ベロックス



**期間限定
お試しプラン**

標準価格
~~¥48,000~~

期間限定特別価格
¥38,000

キャンペーン期間

2017
11/21

2018
1/20



約3分間で吸入

※ドイツ PARI Pharma 社の社内測定による (2.5ml サルブタモール)

専用ベロックスケアでメッシュの詰まり解消!!

MAY01

VELOX®スピーディーで効果的な吸入治療

VELOXは、下部気道に疾患のある患者の生活をより快適にします。
小型・軽量で静粛性に優れており、携帯に便利です。

VELOXは、日々の生活の中で使用していただく事で、患者の日常生活をサポートします。



慢性閉塞性肺疾患（COPD）や気管支喘息といった
急性/慢性気道疾患治療用携帯型吸入器


注文コード M23-001-16

品 番 055G1012

期間限定
特別価格 ¥38,000

吸入器仕様	
電 源：	AC100V 50-60Hz (専用ACアダプター使用時) 単3形アルカリ電池(DC1.5V)×3本 単3形ニッケル水素充電電池(DC1.2V)×3本
消費電力：	1.9VA (専用ACアダプター使用時)
重 量：	110g(電池含まず)
外形寸法：	
ネブライザー：	約W13.9×D6.1×H6.6cm
コントローラー：	約W 7.2×D6.0×H9.1cm
保証期間：	2年(補充品除く)※
一般医療機器	
届出番号：	27B1X00024000332
販 売 名：	PARI ペロックス

※保証の対象は、吸入器電動部のみとなります

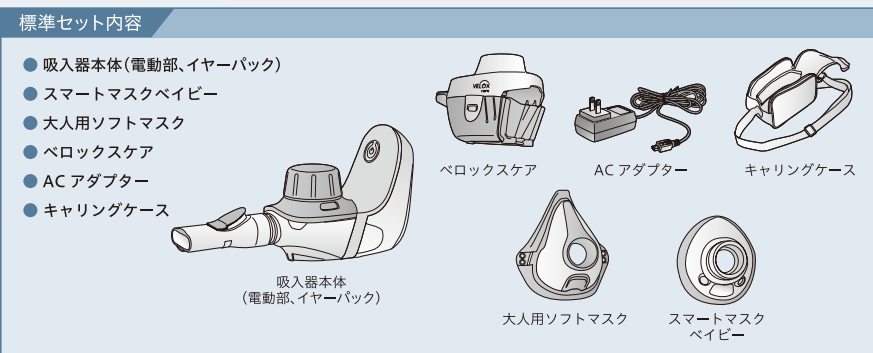

補充品	注文コード	品 番	標準価格
ペロックススクエア	M23-005-01	055G6100	¥2,500
ペロックスキャップ	M23-005-07	055G3500	¥750
ペロックスACアダプター	M23-005-02	055G7101	¥5,300
スマートマスクベビー	M23-005-06	055G4500	¥4,500
ペロックスキャリングケース	M23-005-03	055G8000	¥2,600
ペロックスイヤークッション	M23-005-04	055G3010	¥13,000
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥1,900

別売品	注文コード	品 番	標準価格
ベビーマスク(新生児用)	M23-004-22	041G0700	¥6,000
ベビーマスク(小)	M23-004-23	041G0701	¥6,000
ベビーマスク(中)	M23-004-24	041G0702	¥6,000
ベビーマスク(大)	M23-004-25	041G0703	¥6,000
ベビーベント	M23-004-21	041E0701	¥1,300

※特別価格の対象はペロックス本体のみとなります。補充品・別売品は特別価格対象外です。

特長

- 小型
- 軽量
- 静粛性
- スピーディー
- 携帯性

急性/慢性気道疾患をもつ患者様に



スピーディーかつ効率的な吸入治療：

約3分間の吸入時間で薬液(サルブタモール) 2.5mlを吸入することが可能です。



携帯に便利：AC電源または電池での使用が可能なコンパクトサイズ設計。

※本体重量：110g(電池含まず)/140g(電池含む)



静かな動作音：

使用時の動作音が小さく、周囲に不快感を与えません。



取扱が簡単：少ないパーツ構成で軽量。

人間工学にもとづいた設計で取り扱いが簡単




常に安定した能力を発揮：


付属のVELOX®ケアを使用し、簡単に短時間でメンテナンスが可能。

メッシュ振動技術による効率的な治療を提供

肺への効率的な沈着薬剂量(5μm未満)[単位：%]

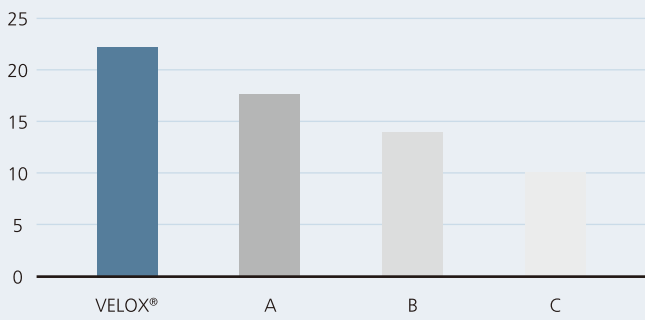

吸入時間[単位：分]

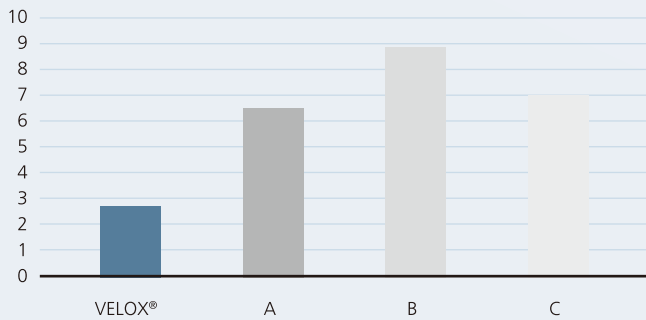

4種類のメッシュ式ネブライザーを比較し、
VELOXが最短時間で効果的な沈着薬剂量を提供します。

PARI Pharma GmbH (在ドイツ・グレーフェルフینگ市)の社内測定による、成人の呼吸吸入
(Vi = 500 ml; 15 bpm; In:Ex = 1:1)に使用可能なサルブタモールの噴霧量：2.5 mg / 2.5 ml

エアロゾルの特性	
分時噴霧量：	497mg/分
粒子径中央値：	3.8μm
5μm以下の粒子質量比率：	74%
<測定条件> 試験液：0.9%生理食塩水(2.5ml) 室温：23℃、湿度：50% 測定装置：Sympatec社 Helios 分時平均吸気流量：20ℓ/分	