

# Campaign

20%  
off

## 7.7M ナーシングストレッチャー キャンペーン



キャンペーン期間

2020.11.01 → 2021.03.31

# フレーム ナーシング

## NST-1

- オーバーラップ方式で移載
- 固定力が高い4輪トータルロック
- すっきり収納のポンベ受け
- 簡単なギャッチ操作
- 移動時にも安心なワンタッチサイドレール
- 小回りが効き、病室などの狭いスペースでも楽々移動の双輪キャスターφ125mm
- ガートル受けは頭側・足側に各1カ所
- 耐荷重125kg

### オーバーラップ方式



※ベッドの形状によっては、オーバーラップができない場合があります



[別売品] アンダーバスケット

[別売品] アッパーバスケット

### 別売品(キャンペーン対象外)



約W385×D385×H75mm  
※有効サイズ

アンダーバスケット  
注文コード 030-123-03  
標準価格 ¥12,000



約W340×D230×H95mm  
※有効サイズ

アッパーバスケット  
注文コード 030-123-11  
標準価格 ¥16,800

(仕様)  
サイズ: W650×L1950×H550~960mm(座面高)  
マットレスサイズ: W510×L1860×t30mm  
材質: (ボトム)樹脂製 (フレーム)スチール  
(マットレス)ビニールレザー(防汚耐薬品性)  
重量: 約61kg  
耐荷重: 125kg  
キャスター: φ125mm(双輪), 4輪トータルロック  
背上げ: 0~45°(無段階調節)  
付属品: ガートル架、ポンベ受け、安全ベルト(2本1組)

注文コード  
**030-123-10**

標準価格  
~~¥328,000~~

期間限定標準価格  
**¥262,400**


## NST-2

- オーバーラップ方式で移載
- 固定力が高い4輪トータルロック
- すっきり収納のポンベ受け
- 簡単なギャッチ操作
- 上肢台としても使用可能な大型サイドレール
- 安定感のある大型双輪キャスターφ150mm
- ガートル受けは頭側・足側に各2カ所  
(別売品ガートル架アダプターで左右に取付可能)
- 耐荷重140kg(緊急時は心肺蘇生にも使用可能)
- 便利な収納スペース(ユーティリティトレー)
- ドレーンチューブフックを標準装備

### オーバーラップ方式



※ベッドの形状によっては、オーバーラップができない場合があります

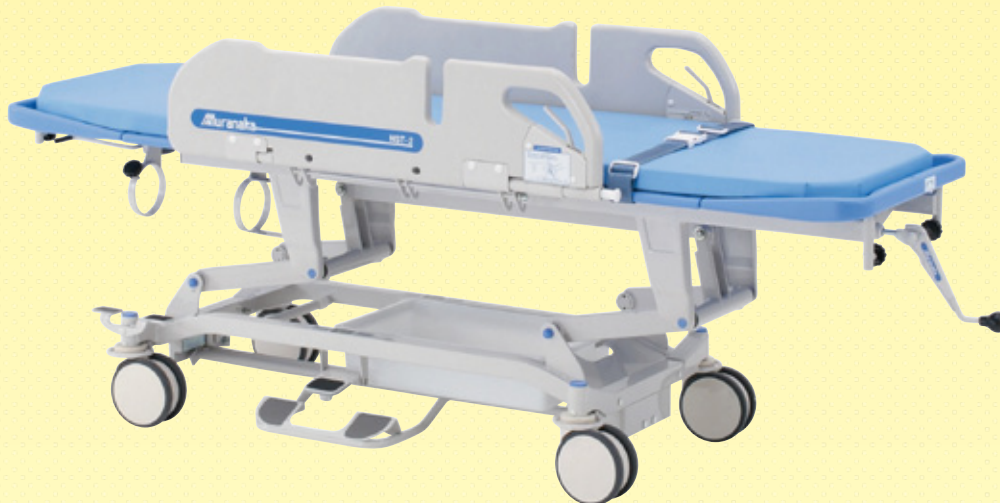

### ドレーンチューブ対応



スリット構造: 左右にフック各3カ所

注文コード  
**030-123-20**

標準価格  
~~¥420,000~~

期間限定標準価格  
**¥336,000**

(仕様)  
サイズ: W630×L1990×H460~810mm(座面高)  
マットレスサイズ: W510×L1900×t40mm  
材質: (ボトム)樹脂製 (フレーム)スチール  
(マットレス)ビニールレザー(防汚耐薬品性)  
重量: 約74kg  
耐荷重: 140kg  
キャスター: φ150mm(双輪), 4輪トータルロック  
背上げ: 0~70°(無段階調節)  
付属品: ガートル架、ポンベ受け、安全ベルト(2本1組)、ユーティリティトレー

# グストレッチャー

3  
YEARS  
GUARANTEE

3年間保証付(全機種)

## NST-3

- 固定力が高い4輪トータルロック
- 双輪大型キャスターφ150mm
- ハイロー、ギャッチアップ機能
- オーバーラップ方式で移載
- ガートル受けは頭側・足側に各1カ所

スライディング機能の搭載により、患者さんを持ち上げることなく移載でき、看護する方の腰への負担を軽減します。



[別売品]  
アッパーバスケット  
(取付フック付)

### オーバーラップ方式



※ベッドの形状によっては、オーバーラップできない場合があります。

### 別売品(キャンペーン対象外)



アッパーバスケット  
(取付フック付)  
注文コード 030-123-24  
標準価格 ¥19,800

(仕様)  
サイズ: W663×L1985×H550~950mm(座面高)  
材質: (ボトム)樹脂製 (フレーム)スチール  
(マットレス)ビニールレザー(防汚耐薬品性)  
重量: 約83kg  
耐荷重: 120kg  
キャスター: φ150mm(双輪)、4輪トータルロック  
背上げ: 0~45°(無段階調節)  
付属品: ガートル架、ポンベ受け

注文コード  
**030-123-30**

標準価格

~~¥548,000~~

期間限定標準価格

**¥438,400**

## 患者移載時の 操作手順



患者さんを側臥位にし、サイドレールを降ろします。



巻き込みハンドルを回して繰り出しベルトを送り出します。



繰り出しベルトを患者さんの体の下に敷きこみ、患者さんを仰臥位にします。



体を支えながら繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで巻き取ります。



サイドレールを戻し、安全確認後、患者さんを移送します。

※移載手順を見やすくするために1人の状態で撮影しています。実際には安全のため、2人以上で移載を行ってください。

# MMI<sup>®</sup> ムーブボードII

患者さんの移載がスピーディーに行えます！

- 看護・介護する方の腰への負担を軽減します。
- コンパクトに折りたたみため、手軽に持ち運べます。
- 抗菌・防水加工を施しています。
- X線が透過します。

(仕様)  
 サイズ：W490×L1700×t115mm  
 折りたたみ時サイズ：W490×L850×t30mm  
 ローラーシートサイズ：W505×L1680mm  
 材質：特殊ナイロン、ポリカーボネート  
 重量：約3.3kg  
 使用可能患者体重：280kg以下

カラー	レッド 	グリーン 
注文コード	135-020-03	135-020-04
標準価格	¥44,000	¥44,000



使用例



折りたたみ例

用途：手術室、ICU、処置室、救急、病室、レントゲン室、CT-MRI他、シーツ交換等に

ムーブボードIIを使用した移載の手順




※ベッドとストレッチャーの高さをほぼ同じに、隙間間隔は10cm以内になるように、ベッドあるいはストレッチャーを調節してください。  
 ※移載手順を見やすくするために1人の状態で撮影しています。実際には安全のため、2人以上で移載を行ってください。

■ 補充品：専用ローラーシート

注文コード	カラー	標準価格
135-020-05	レッド	¥9,800
135-020-06	グリーン	¥9,800

■ 別売品：デスポカバー

注文コード	入数	標準価格
030-020-08	1袋(10枚入)	¥3,400



MMI ムーブボードIIの  
 使用方法詳細については  
 こちらからご覧いただけます。

## フラムストレッチャーカバー

- 撥水の不織布に防水加工を施したストレッチャー用のカバーです。
- 両サイドのポケットに固定することにより「ズレ」を防止します。

(仕様)  
 サイズ：W550×L1850mm  
 ポケット部サイズ：550×150mm  
 材質：SMS25g+PEラミ  
 カラー：ブルー  
 入数：1ケース(100枚入)  
 対応機種：NST-1



注文コード	品番	標準価格
030-123-31	MP-FDS-185	¥52,000

## フラム防滑ストレッチャーシート

強力防滑加工・高強度・バリア性を兼ね備えたシートです。

- 特殊な防滑加工により患者さんの体位変換時のスレやヨレを防止します。
- 強度が高く、手術室のフロアシートや手術台などでも使用できます。
- バリア性に優れており、内視鏡治療等にも使用できます。

(仕様)  
 サイズ：W800×L2100mm  
 材質：(防滑面)オレフィン系樹脂  
 (吸水面)ポリプロピレン  
 入数：1ケース(10枚×10袋入)  
 対応機種：NST-1、NST-2



注文コード	品番	標準価格
030-123-32	MP-E5-821B	¥44,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。