



良性皮膚病変の凍結治療器

クライオサクセス

クライオサクセス

病変にピンポイントで接触しやすいペンタイプです。
皮膚表面にコンタクトチップを接触させて凍結剤を噴射することにより冷却します。

カートリッジ

凍結剤(亜酸化窒素)が充填されているカートリッジは
安全弁付のため容易にかつ安全に交換が可能です。

コンタクトチップ

皮膚病変に対してφ1mmもしくはφ4mmのコンタクトチップの選択が可能です。
コンタクトチップは高圧蒸気滅菌可能です。(最大134℃)



φ1mm



φ4mm

原 理

本品は、皮膚病変の凍結治療に用いる医療機器です。冷媒として、小型のカートリッジ容器に充填された亜酸化窒素(=凍結剤)を使用します。ユニットのレバー操作により、凍結剤は治療部位に供給され、皮膚表面で沸点(約-89℃)にて気化することにより急速に熱を奪って冷却します。

【推奨治療時間(例)】

老 化 色 素 …… 1 - 2秒
良 性 腫 瘍 …… 3 - 4秒
老年性角化症 …… 7 - 8秒
コンジローマ …… 8 - 12秒
足 底 疣 贅 …… 15 - 20秒
日光角化症 …… 4 - 5秒
脂漏性疣贅 …… 6 - 8秒
尋常性疣贅 …… 8 - 10秒
軟性線維症 …… 4 - 5秒



セット内容

- ①カートリッジ × 2
- ②クライオユニット × 1
- ③コンタクトチップ(保護キャップ付) …φ1mm × 1
…φ4mm × 1
- ④ピン × 1



注文コード	品 番	商品名
N80-001-01	C-SUC-01	クライオサクセス(ケース付セット)*

補充品

注文コード	品 番	商品名
N80-001-03	C-CA-23	カートリッジ(1本入)**
N80-001-05	C-STS-01	φ1mmコンタクトチップ(保護キャップ付)**
N80-001-06	C-DTS-04	φ4mmコンタクトチップ(保護キャップ付)**
N80-001-07	C-PI-01	ピン

- 凍結剤：液化亜酸化窒素(充填量:約23.5g)
- 材 質：(コンタクトチップ先端)ホウケイ酸ガラス
- 使用条件：(周囲温度)常温
- 保管・輸送条件：(周囲温度)-10～50℃
- 耐用期間：5年[自己認証(当社データ)による]
※クライオユニット、コンタクトチップ

凍結剤に関する一般情報

一般名(化学名)	亜酸化窒素(一酸化二窒素)
分子式	N ₂ O
分子量	44
沸 点	-88.5℃
圧 力	5.08MPa(20℃)

*高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
承認番号:23000BZX00326000
販 売 名:クライオサクセス

**高度管理医療機器
承認番号:23000BZX00326000
販 売 名:クライオサクセス

※カートリッジに充填されております亜酸化窒素については平成28年厚生労働省令第21号により「指定薬物」として指定されており、本用途以外での使用は禁止されています。部外者による盗難や不正な持ち出し等が行われないよう(鍵のかかる持ち運びのできない場所での保管等)適切な管理を行ってください。また、廃棄を行う際には、廃棄物を盗取されないよう適切な方法をもって廃棄を行ってください。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東 京 支 店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363